

SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

Nålelektrod för gynekologi (110 mm skaft)

Nålelektrod nål i volfram för punktdiatermi. Använd lägst möjliga uteffekt för önskat resultat och anpassa uteffekten till vävnadens beskaffenhet och typ av ingrepp.

Art nr	Färg	Nål dia	Nål längd	Skaft	Fattning dia	Antal/förp
DLP-N11	Röd	0,8	15	110	2,4	10
DLP-U11	Svart	0,2	15	110	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Elektrodförlängare för gynekologi

DXT-S06 och DXT-L09 används som elektrodförlängare vid slyngdiatermikonisering för att eliminera risken för lateralt tryck på elektroden. DXT-S06 rekommenderas vid direkt visualiserat ingrepp för att inte operatörens hand ska störa det visuella fältet. DXT-L09 rekommenderas vid kolposkopiskt visualiserat ingrepp för att inte pennan skall vara i vägen för kolposkopet.

Art nr	Färg	Förlängning i mm	Fattning diameter	Antal/förp
DLP-X10	Blå	100	2,4	10
DXT-S06	Blå	60	2,4	10
DXT-L09	Blå	90	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Material

	Nålelektrod	Förlängare
Nål	Volfram	-
Skaft	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Isolering	Polyolefin	Polyolefin

Observera

- Nålelektroden får inte vridas/böjas.
- Undvik direkt kontakt med metall.
- Använd isolerade kirurgiska instrument.
- Rengör endast med fuktad gasväv.
- **Får ej omsteriliseras eller återanvändas.**

1711