

## SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

### **Cervex-Brush® Combi för provtagning till HPV och cytologi diagnostik**

Screening för detektion av cervikal cancer och förstadier har minskat förekomsten och mortaliteten i denna form av cancer.

Cervex-Brush® Combi gör det möjligt att samtidigt uppsamla celler från ektocervix, endocervix och transformationszonen i ett enda prov utan blödning eller smärta med endast 2 rotationer medurs i cervikal os.

Produkten ger ett högt utbyte av endocervikala celler och HPV virus och därmed en högkvalitativ diagnostik av cervikala lesioner.

Cervex-Brush® Combi kan användas för HPV testning, konventionell- och vätskebaserad cytology. Det hydrofoba materialet på borsten underlättar frisläppandet av cellmaterial till vätskan.

### **Användning**

För in Cervex-Brush® Combi i den endocervikala kanalen. Tryck lätt mot cervix tills sidoborstarna böjer sig mot ectocervix. Behåll ett lätt tryck och rotera Cervex-Brush® Combi två gånger medurs genom att rulla skaftet mellan tumme och pekfinger. Följ sedan klinikens protokoll för hantering av cellprovet för HPV testning samt konventionell eller vätskebaserad cytologi.

### **Observera**

- Rovers® Cervex-Brush® Combi är latex-fri.
- Får endast användas av medicinsk personal.
- Följ klinikens protokoll för säker hantering av mänskliga prover.
- Får ej omsteriliseras eller återanvändas.

### **Förpackning**

Minsta förpackning är 500 st förpackade i 20 plastpåsar med 25 st i varje.

**CORTEC MEDICAL AB**

Kanalgatan 3, 211 40 Malmö, tel: 040 664 59 50, fax: 040 788 63, kundservice@cortec.com , www.cortec.com

*Tillverkas av Rovers Medical Devices B.V., Nederländerna*